

PASTILLA EFERVESCENTE CON PODER LIMPIADOR Y DESINFECTANTE
PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y SUPERFICIES HOSPITALARIAS

Bactericida • Virucida • Fungicida • Micobactericida • Esporicida

Klorkleen®

TABLETAS EFERVESCENTES DESINFECTANTES Y LIMPIADORAS

PRESENTACIÓN



Frasco con
150 tabletas



PODER RESIDUAL
hasta 24 horas
en superficies.



**AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE**
No tóxico ni irritante a las
concentraciones indicadas.



TIEMPO DE CONTACTO
de 2 minutos.



LIMPIA Y DESINFECTA
en 1 solo paso,
sin enjuague.



¿QUÉ ES KLORKLEEN?

KLORKLEEN es un desinfectante y limpiador de alto nivel a base de cloro orgánico en forma de tabletas efervescentes, envasadas en frascos de polipropileno / polietileno; cada frasco contiene 150 tabletas.



MECANISMO DE ACCIÓN

KLORKLEEN penetra en la membrana celular de cada microorganismo y destruye a las células desde el interior, impidiendo procesos adaptativos al componente activo, asegurando nula resistencia de los microorganismos ante el desinfectante.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- El NaDCC conserva el poder letal por 24 horas en las superficies gracias a un equilibrio químico 50/50 que continúa generando cloro.
- No es inactivado por suciedad, paños o materia orgánica.
- No afecta los acabados de piso.
- Amigable con el medio ambiente y cuida la salud de los colaboradores.
- No tóxico ni irritante a las concentraciones indicadas.
- Cuida equipos y superficies metálicas. No es corrosivo.
- No requiere rotación del desinfectante.
- Tiempo de contacto de 2 minutos, mejora la rotación entre pacientes.
- No requiere enjuague, limpia y desinfecta en 1 solo paso.
- Presentación práctica que ahorra espacio en almacenamiento.
- Excelente estabilidad, no reacciona con la luz o el medio ambiente.



INSTRUCCIONES DE USO

- Añada 1 pastilla a 5 litros de agua, para una concentración de 200 ppm de cloro disponible.
- Para áreas críticas use 1 pastilla por litro, para una fuerza de solución de 1000 ppm.
- Para uso en la manipulación de alimentos y procesamiento de superficies, añada una pastilla a 10 litros para dar 100 ppm de cloro disponible.



RENDIMIENTO

Cada frasco de KLORKLEEN
rinde para 150 litros de producto
a una concentración de 1000 ppm.

CARACTERÍSTICAS

• Principio activo:	NaDCC Dicloroisocianurato de sodio Cloro orgánico
• Contenido de NaDCC:	1.67 g / tableta
• Contenido de cloro disponible:	1,08 g / tableta
• Tensoactivo:	Dodecibenceno sulfonato de sodio
• Aspecto:	Blanco, plano biselado afilado, pastilla efervescente
• Olor:	Ligero olor a cloro
• Peso promedio:	4.03 gr
• Desintegración:	≤ 12 minutos (en 1000 ml de agua)
• Solubilidad:	Soluble en agua



Agradable olor a limpio



No requiere equipo de dispensación



Los envases después de ser
lavados con agua pueden
ser reciclados



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Evite el contacto con materiales inflamables.
- En presencia de ácidos puede liberar gases tóxicos.
- No almacenar junto con ácidos.



ESTABILIDAD

Las tabletas de KLORKLEEN han sido evaluadas en condiciones reales (25°C / 60% HR) y extremas (40°C / 75% HR), presentando en todos los casos una estabilidad superior a dos años.



ESPECTRO MICROBIOLÓGICO

KLORKLEEN tiene amplio espectro: bactericida, virucida, fungicida, micobactericida y esporicida. Posee capacidad residual de 24 horas que destruye continuamente las biopelículas en superficies, incluso en presencia de materia orgánica. Consulte la ficha microbiológica correspondiente.



IMPACTO AMBIENTAL

Cuenta con certificado de biodegradabilidad y declaración de no fenoles. Producto de bajo impacto ambiental, su estructura química se degrada completamente en diferentes condiciones naturales mediante hidrólisis catalizada biológicamente.



KLORKLEEN se encuentra incluido en la Lista K de la EPA por su efectividad frente a las esporas de *Clostridium difficile*.



CALIDAD GARANTIZADA

KLORKLEEN se fabrica bajo las normas de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y está certificado en ISO 9001:2008 e ISO 13485.

Inspeccionado regularmente por la HPRA (autoridad de Irlanda), garantizando cumplimiento de GMP europeas. Las inspecciones ISO 9001:2008 e ISO 13485 se realizan cada 2 años por NSAI (National Standards Authority of Irlanda).



55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com